



Le **CRESCENDO 60** capte les signaux acoustiques environnants via le microphone externe, les amplifie puis les envoie sur la prise pour écouteurs. Cet amplificateur sonore possède en outre une bobine magnétique permettant de réceptionner les signaux d'une boucle d'induction magnétique.

Vous réglez le volume et la sonorité en continu à l'aide de molettes faciles à manier, au niveau qui vous convient. Vous recevez le son, via un casque stéthoscopique confortable et ultraléger, ou un collier magnétique directement dans l'oreille et comprenez parfaitement la conversation, l'émission radio ou de télévision, les conférences.


Un sélecteur coulissant permet 3 modes de fonctionnement. Les trois réglages suivants sont possibles :

Position »M« : Fonctionnement avec le microphone externe. Micro enfichable ou micro-cravate.

Position »A« : Position du sélecteur pour le raccordement direct d'une source audio via un câble audio stéréo de 3,5 mm.

Position »T« : Fonctionnement comme récepteur à boucle magnétique.

Éléments de commande

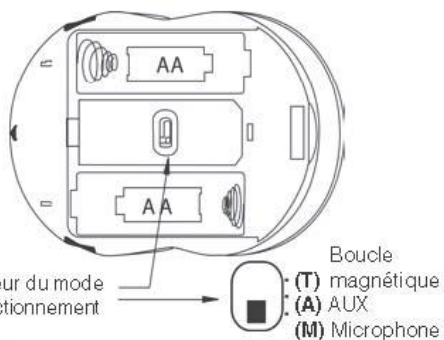

34 Français

Éléments et accessoires inclus :

- ✓ **CRESCENDO 60**
- ✓ 2 piles AA de 1,5 V pour une durée d'utilisation de 75 h
- ✓ Casque stéthoscopique ultraléger, cordon 1,25 m sur jack 3,5 mm stéréo
- ✓ Collier magnétique, cordon 60 cm sur jack 3,5 mm stéréo
- ✓ Clip de ceinture et tour de cou
- ✓ Microphone enfichable sur jack 3,5 mm mono
- ✓ Rallonge pour micro enfichable de 4 m
- ✓ Micro-cravate avec cordon de 1,2 m
- ✓ Mode d'emploi
- ✓ Bon de garantie

Caractéristiques générales

Couleur : blanc, gris

Dimensions : 95 x 62 x 26 mm

Poids : 110 g (avec piles)

Amplification maximale : 60 dB

Caractéristiques techniques

Alimentation : 2 piles 1,5 V AA/LR6

Autonomie : environ 75 heures

Réglages et signalisation

LED lampe-témoin MARCHE/ARRÊT

Réglage de la tonalité

Réglage du volume

Sélecteur mode de fonctionnement par un interrupteur coulissant à 3 positions dans le boîtier.